



FOMADENT M

SET DE REVELATOR ȘI FIXATOR PENTRU MAȘINA DE PRELUCRAT FILME RADIOGRAFICE DENTARE

Caracteristici

Setul FOMADENT M conține concentrat lichid de Revelator FOMADENT MD și fixator FOMADENT MF pentru mașini de dezvoltat filme radiografice dentare FOMA – DENTIX și a produselor comparabile ale altor producători. Soluțiile de lucru se prepară prin diluarea cu apă a soluțiilor concentrate, de preferință cu apă distilată sau obținută prin osmoză inversă.

FOMADENT MD revelator este un concentrat cu un singur component pentru prepararea revelatorului pentru mașina de prelucrare film radiografic dentar. Revelatorul garantează o înaltă calitate a imaginii, conferă o granulație fină imaginii cât și un contrast bine balansat. Utilizează la maxim marea sensibilitate a filmului. Compoziția îi asigură o stabilitate de durată și evită incrustațiile în cazul unei ape dure.

FOMADENT MF fixator rapid este un concentrat cu un singur component pe bază de tiosulfat de amoniu pentru prepararea fixatorului pentru mașina de prelucrare film radiografic dentar. Se caracterizează printr-o mare viteză de fixare și eficiență, putere mare de tamponare și stabilitate îndelungată.

Ambalare

FOMADENT M se livrează în ambalaje de două tipuri:

FOMADENT M 1,75 – setul conține

4 x 500 ml de concentrat FOMADENT MD 1,75 și 5 x 500 ml de fixator rapid concentrat FOMADENT MF 1,75.

Setul este destinat preparării a 5 x 1,75 litri soluție de lucru de revelator, și de 5 x 1,75 litri soluție de lucru de fixator.

FOMADENT M 2,5 – setul conține

2 x 1 litri de concentrat FOMADENT MD 2,5 și 2 x 1 litri de fixator rapid concentrat FOMADENT MF 2,5.

Setul este destinat preparării a 2 x 2,5 litri soluție de lucru de revelator, și de 2 x 2,5 litri soluție de lucru de fixator.

Prepararea soluțiilor de lucru

1. Prepararea soluției de lucru de revelator Revelatorul concentrat FOMADENT MD 1,75 se aduce cu apă la volum de 1,75 litri.

Revelatorul concentrat FOMADENT MD 2,5 se aduce cu apă la volum de 2,5 litri.

2. Prepararea soluției de lucru de fixator

Fixatorul concentrat FOMADENT MF 1,75 se aduce cu apă la volum de 1,75 litri.

Revelatorul concentrat FOMADENT MF 2,5 se aduce cu apă la volum de 2,5 litri.

Prelucrarea filmelor

Condiții standard recomandate pentru dezvoltare

Temperatură (°C)	Timp (s.)
25	90
28	60

Se recomandă acoperirea tancului cu revelator

Condiții standard recomandate pentru fixare

Temperatură (°C)	Timp (s.)
20	60
30	45

Depozitare

Soluțiile concentrate se vor păstra în ambalajele originale într-un loc uscat, la o temperatură de +5 la +25 °C, pe o perioadă care să nu depășească 24 luni de la data fabricării.

Un lot de soluție preparată se va utiliza în curs de 3 la 4 săptămâni.

Produsul a fost fabricat și marcat conform sistemului de calitate stabilit prin standardul internațional EN ISO 9001